

浴室起身椅

用途

協助高齡、骨質疏鬆或行動不便者，獨自安全、舒適入浴泡澡。

- 放完水，不必等待、忍受寒冷；確認水溫，健康防護有保障。
- 入浴後，升降蓆降到浴缸底部，無高度差，可貼背享受泡澡樂趣。

產品特色

- 有扶手及轉位椅(需另購)之設計，更安全放心地進出浴槽。
- 防水手控器及機體按鍵，有2組操作鍵，配合個人習慣使用。
- 浴槽水溫偵測顯示，舒適、健康控管看得到。
- 升降蓆，拆裝、收納容易，不會影響他人使用浴缸。
- 低壓充電式電池電源，無觸電之安全顧慮。
- 手控器防水設計，機體防水淋、防潮濕設計。
- 安全設計：1. 捲出升降蓆時，有STOP警告字條及自動偵測停止功能，防止升降蓆反向回捲。
2. 使用前鋪升降蓆時防止過度拉緊之自動偵測停止功能。



使用步驟



1. 坐在升降蓆上，右手握住主機扶手。

2. 轉身，雙腳跨入浴槽。

3. 將臀部，移至升降蓆之坐墊上。

4. 按手控制向下，下降直到浴槽底部。



5. 享受入浴泡澡。



防水手控器

升降蓆，拆裝、收納容易，不會影響他人使用浴缸。



安裝轉位座椅(需另購)使用圖示



扶手

轉位座椅
升降蓆

產品規格

ABL-125B

最大載重	125Kg
電源	24VDC (可充電電源)
充電器	IN : 100~240V AC / OUT : 24V DC 400mA
升降控制	防水手控器+主機控制鍵
水溫顯示	顯示器(水溫溫度)+水溫測量探針
電源燈	正常使用中亮綠燈、電池快用盡時亮黃燈
警告燈	負載過重時亮紅燈、升降幕反轉閃紅燈
主機淨重	14.6kg(含電池1.7kg)
主機尺寸	52.5(長)X34(高)X9.5(深)公分




低壓充電式電池




產品尺寸

主機

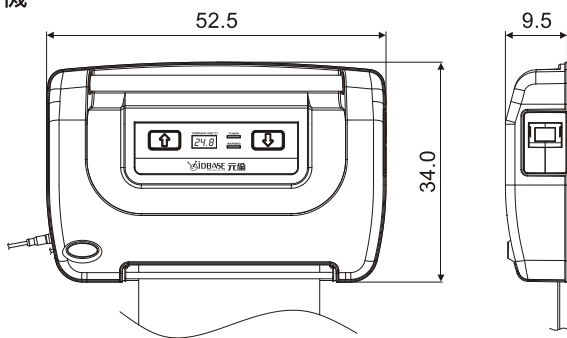


轉位座椅(需另購)

單位 : cm


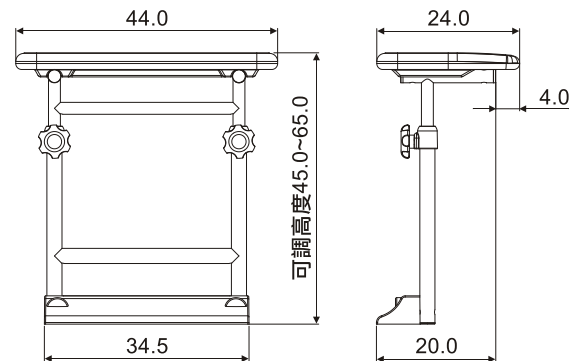


地面安裝示意圖

以使用者舒適躺臥浴缸中, 臀部之位置

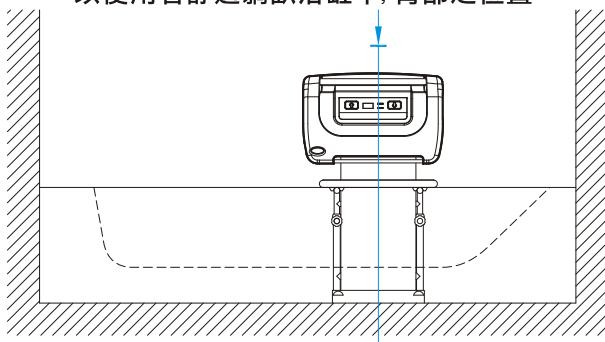

※詳細安裝步驟請參照說明書

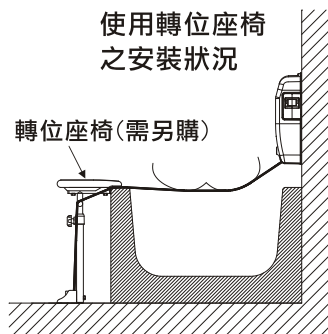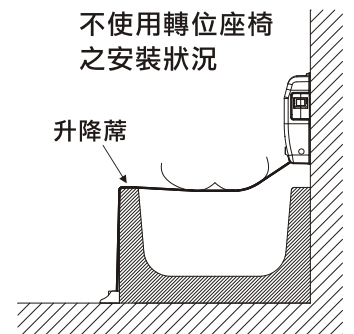使用轉位座椅
之安裝狀況不使用轉位座椅
之安裝狀況

AIDBASE 元倫
take care your life

富長興股份有限公司
EVER RICH FLOURISH CO., LTD.



聯絡資料

地址：台中市豐原區水源路465號

電話：04-25280700

Mail：hyj@airbase.com.tw

聯絡人：黃貽經